



LUNGE ZÜRICH

Hilft. Informiert. Wirkt.

seit 111 Jahren

Merkmale

Reinigung von CPAP- und MHSV-Geräten und Zubehör

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Spezielle Hinweise
Maske	<p>Mit nicht-fettendem Spülmittel und weichem Tuch, Schwamm oder unter fließendem Wasser waschen, mit klarem Wasser gut spülen und an der Luft trocknen lassen.</p> <p>Nicht einweichen.</p>	<p>Vor der Reinigung sorgfältig auseinander nehmen, anschließend wie üblich reinigen.</p>		<p>Auf keinen Fall verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desinfektionsmittel• Alkohol• Scheuermittel• Scharfe Haushaltsreiniger• Rückfettende Seifen
Kopfband		<p>Mit nicht-fettendem Spülmittel von Hand waschen, gut ausspülen und aufgehängt an der Luft trocknen lassen.</p> <p>Alternativ können Sie das Kopfband bei 30 Grad in einem Wäschebeutel und mit Feinwaschmittel in der Waschmaschine waschen.</p> <p>Nicht bügeln.</p>		

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Spezielle Hinweise
Schlauch	Bei Verwendung eines Befeuchters: Schlauch von Gerät und Maske trennen und zum Austrocknen aufhängen.	Mit nicht-fettendem Spülmittel waschen, gut durchspülen und aufgehängt an der Luft trocknen lassen.		Achtung beheizbare Schläuche: Elektrische Kontakte dürfen nicht nass werden.
Befeuchterkammer	Am Morgen Wasser entleeren und Befeuchterkammer geöffnet trocknen lassen. Vor Benutzung frisches, destilliertes und damit kalkfreies Wasser ohne Zusätze einfüllen.	Befeuchterkammer mit nicht-fettendem Spülmittel auswaschen. Eine Reinigung ist auch im Geschirrspüler möglich: Befeuchterkammer einzeln, d.h. ohne weitere Gegenstände, bei 70 Grad und ohne Spülmittel im Geschirrspüler reinigen.		Entfernen allfälliger Ablagerungen: 1 Teil Essig und 10 Teile Wasser während 10 Minuten einwirken lassen, dann reinigen und mit klarem Wasser nachspülen.
Filter			Je nach Gerätetyp waschen oder austauschen.	
Gerät		Gehäuse mit trockenem Tuch abreiben.		

Juli 2018