

Merksblatt

Reinigung des Inhalationsgeräts und Zubehör

Reinigungsanleitung

1. Den Vernebler nach jeder Inhalation in seine Teile zerlegen, mit warmem Wasser ausspülen und gut reinigen.
2. Die einzelnen Teile können auch in der Geschirrspülmaschine bei mindestens 50 Grad gewaschen werden. Wichtig ist, den Vernebler nicht mit verschmutztem Geschirr und ohne Spülmittel und Glanzspüler zu reinigen.
3. Schütteln Sie angesammeltes Wasser aus den einzelnen Teilen gut aus, um das Trocknen zu beschleunigen.
4. Schliessen Sie das Verneblerunterteil nochmals an den Luftschlauch an, und lassen Sie die Düse kurz durchblasen.
5. Der Luftschlauch muss trocken bleiben. Falls sich Kondenswasser bildet, lassen Sie den Luftschlauch ohne Vernebler durchblasen.
6. Die einzelnen Teile auf einer trockenen, sauberen und saugfähigen Unterlage vollständig austrocknen lassen.
7. Den Vernebler in ein sauberes, fusselfreies Tuch einwickeln und an einem trockenen Ort aufbewahren.
8. Der Vernebler muss einmal jährlich ersetzt werden.
9. Gerätefilter wechseln:
Jährlich, bei Verfärbungen oder wenn er feucht ist.

Desinfektion

Grundsätzlich sollte der Vernebler einmal wöchentlich desinfiziert werden. Bei Patienten mit Cystischer Fibrose oder bei Infekten sollte der Vernebler vermehrt, nämlich nach jeder Inhalation desinfiziert werden.

1. Kochen Sie den Vernebler mindestens 10 bis 15 Minuten in destilliertem Wasser aus.
2. Sie können auch ein handelsübliches, thermisches Desinfektionsgerät (z.B. für Babyflaschen) nutzen, Desinfektionszeit ca. 15 Minuten.

Aufbewahrungshinweis für den Inhalationsapparat

Schützen Sie den Inhalationsapparat mit einem Tuch vor Staub und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.

